

FICHA TÉCNICA

ALCOSOFT DESINFECTANTE GEL

REGISTRO INVIMA 2023 DM-0027423

PRODUCTO DESINFECTANTE DE RÁPIDA ACCIÓN A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 70% (V/V) CON EXTRACTO DE ALOE VERA.

COMPOSICIÓN:

- Alcohol Etílico 70% V/V
- Extracto de Aloe Vera
- Glicerina
- Agente gelificante
- Disolvente.

ASPECTO FÍSICO: Gel translúcido incoloro.



No corrosivo



Biodegradable



Alta
eficiencia



PRESENTACIÓN: 30ML - 120ML - 250ML - 500ML - 1000ML - 3600ML

MECANISMO DE ACCIÓN: La acción antimicrobiana del alcohol etílico es la desnaturalización de las proteínas, actúa como un osmolito o agente deshidratante que altera el equilibrio osmótico a través de las membranas celulares.

CARACTERÍSTICAS: Se aplica en la desinfección de dispositivos médicos, instrumental y equipos en el sector clínico-odontológico, hospitalario y afines.

Tiene acción rápida, desarrollado para el control bacteriano. A pesar de tener una base de Alcohol, no deja olores residuales después de haber sido utilizado.

Tipo de dispositivo: No invasivo.



INSTRUCCIONES DE USO:

1

Se recomienda realizar previo lavado, con el fin de eliminar la materia orgánica presente. Recuerde que desinfectante DE INACTIVAN en presencia de materia orgánica

2

Aplique **ALCOSOFT DESINFECTANTE GEL** directamente sobre la superficie del dispositivo médico, hasta cubrirlo completamente

3

Deje actuar durante mínimo 5 minutos, mientras el producto se evapora

4

No requiere enjuague posterior con agua

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con los ojos, en tal caso lavar con abundante agua.
- En caso de reacción adversa en contacto con la piel, lavar con abundante agua. Si la reacción persiste, consulte a su médico.

ALMACENAMIENTO: Manténgase bien tapado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar, producto volátil.

VIDA UTIL:

- 36 MESES, Conservándose tapado, en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar.